

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://analitpribor.nt-rt.ru/> || [anp@nt-rt.ru](mailto:anp@nt-rt.ru)

## КОМПЛЕКТ «ТАБАК»



Набор одноразовых тестов предназначен для анализа наркотических средств и психотропных веществ, во внелабораторных условиях методом капельных химических реакций.

Комплект обеспечивает:

- анализ наркотических средств и психотропных веществ во внелабораторных условиях;
- анализ и обнаружение таких средств как: героин, морфин, кодеин, кокаин, амфетамин, метамфетамин, экстазе (МДА, МДМА, МДЕА), ДОБ, гашиш и опий, солома мака, метадон.

### РАБОТА С КОМПЛЕКТОМ:

Для определения вещества пробу помещают с помощью пробоотборного шпателя в пакет теста, закрывают и проводят исследования согласно инструкции, нанесенной на боковую поверхность теста.



**Контроль целостности пакета и сварочных швов осуществляется согласно ГОСТ 9.014-78**

### Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха от +5 до +35 °С;
- относительная влажность окружающего воздуха до 80 % (при температуре 25 °С);
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).



### Комплект поставки:

- комплект «Табак» (ИБЯЛ.305654.101) в составе - 1 шт.;
- укладка «Тест героин» (ИБЯЛ.305648.135) - 1 шт.;
- укладка «Тест амфетамин» (ИБЯЛ.305648.136) - 1 шт.;
- укладка «Тест кокаин» (ИБЯЛ.305648.137) - 1 шт.;
- укладка «Тест гашиш, марихуана» (ИБЯЛ.305648.138) - 1 шт.;
- укладка «Тест опий, солома мака» (ИБЯЛ.305648.139) - 1 шт.;
- укладка «Тест метадон» (ИБЯЛ.305648.140) - 1 шт.;
- паспорт (ИБЯЛ.305654.101ПС) - 1 экз.;
- упаковка (ИБЯЛ.465926.020) - 1 шт.



Масса отдельной укладки должна быть не более 0,2 кг, масса изделия (набора отдельных упаковок из 6 шт.) в транспортной упаковке (в деревянном ящике) не более 3,5 кг. Укладки, входящие в состав комплекта «Табак», могут поставляться отдельно. Минимальное количество упаковок одного вида в заказе - 60 шт., общее количество упаковок при заказе - кратно 60. Общее количество упаковок, поставляемых заказчику в один адрес - кратно 6. Условия поставки упаковок и их количество оговариваются при заказе.



Гарантийный срок хранения - 2 года со дня приемки комплекта представителем заказчика.

Комплектующие по согласованию с представителем заказчика могут быть заменены на аналогичные.